

# 検体測定室外部精度管理調査 試験用試料採取手順

## 冷凍試料: 脂質用 【Afinion】

### ■ 届くもの



1装置につき

- A 測定試料 1本 容量 0.3mL  
(小箱入り)
- B ピペット 3本  
(Afinion では使用しない)



### ■ 薬局様にて準備するもの

- ・測定試薬カートリッジ(ディスク)  
※少なくとも2回分
- ・専用の廃棄箱
- ・ゴム手袋(パウダーフリー)

### ■ 採取手順



① 試料を室温に取り出し、  
静置する(20分)。

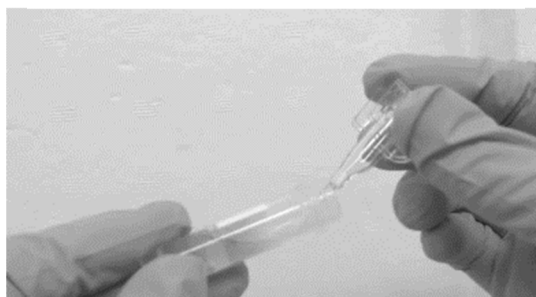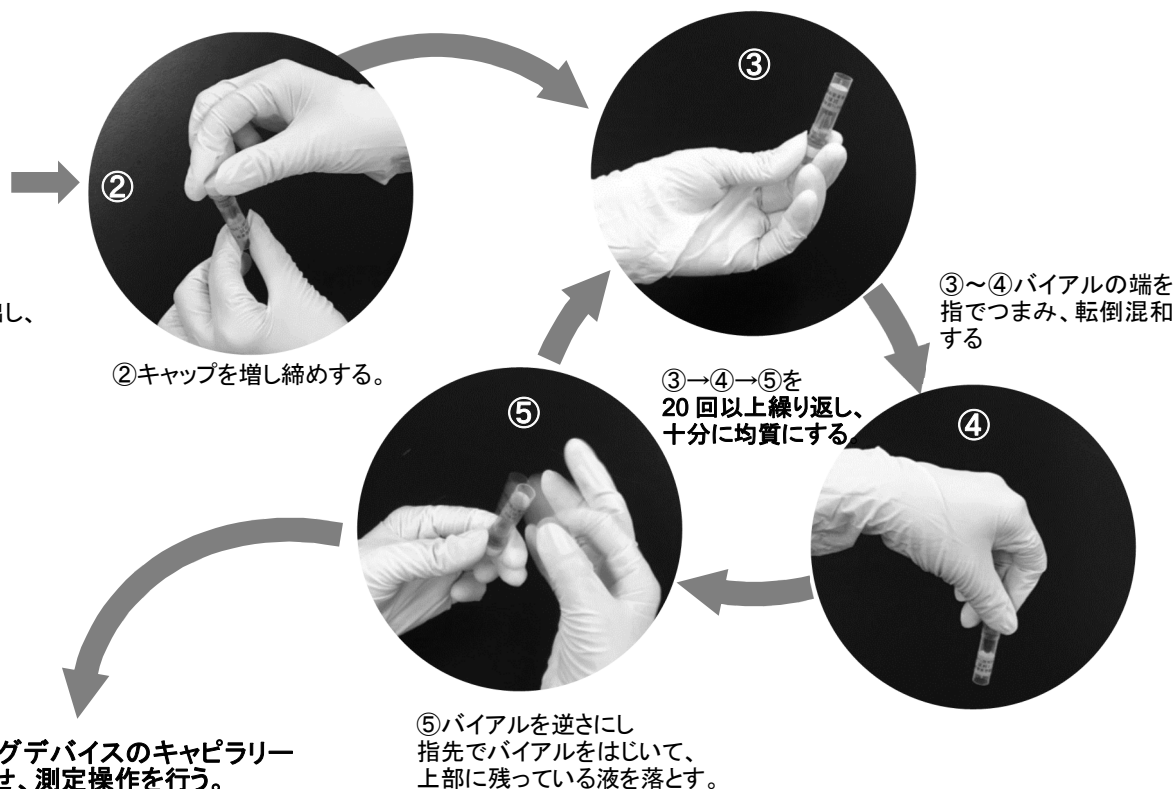

#### 【キャップを開けるときの注意点】

※キャップを開ける前にバイアル上部  
をはじいて、キャップ内に付着している  
液を落としてください。(⑤と同じ操作)

#### 【注意】

- 測定は計2回(同試料2回測定)のため、少なくとも2回分の試薬カートリッジ(ディスク)が必要です。
- 測定日が試薬カートリッジ(ディスク)の有効期限内であることをご確認ください。
- すべての測定(2回)は1時間以内に終了させてください。
- 測定ごとに、上記の転倒混和及び試料採取を行ってください。